



## Painel de Controle Topaz PHD - Funções básicas

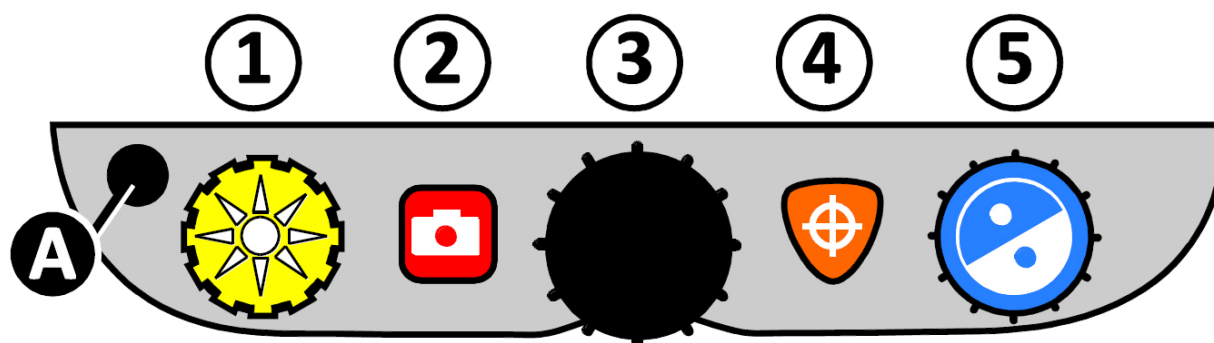

(1)	Brilho (botão amarelo)	Girar para a direita para aumentar o brilho da tela. Girar para a esquerda para diminuir o brilho da tela.
(2)	Congelar quadro (botão vermelho)	Pressione para congelar a imagem que é exibida na tela. Pressione de novo para retornar a visualização simultânea. Pressione e segure por aproximadamente seis segundos para entrar ou sair no modo de revisualização.
(3)	Ampliação (botão preto central)	Amplie girando para o lado direito. Diminuir a ampliação girando para o lado esquerdo.
(4)	Encontrar (botão laranja)	Pressione e segure o botão para diminuir o zoom e aparecer um alvo na tela, posicione o centro do alvo movimentando o objeto embaixo da câmera. Solte o botão para retornar no nível de ampliação anterior.
(5)	Modo de Cor (botão azul)	Gire o botão através dos modos de cor.
(A)	Avançado (botão preto - lado esquerdo)	Use em combinação com outros controles para acessar e realizar outros recursos. Veja Funções Avançadas para mais informações.

## Painel de Controle Topaz PHD - Funções Avançadas

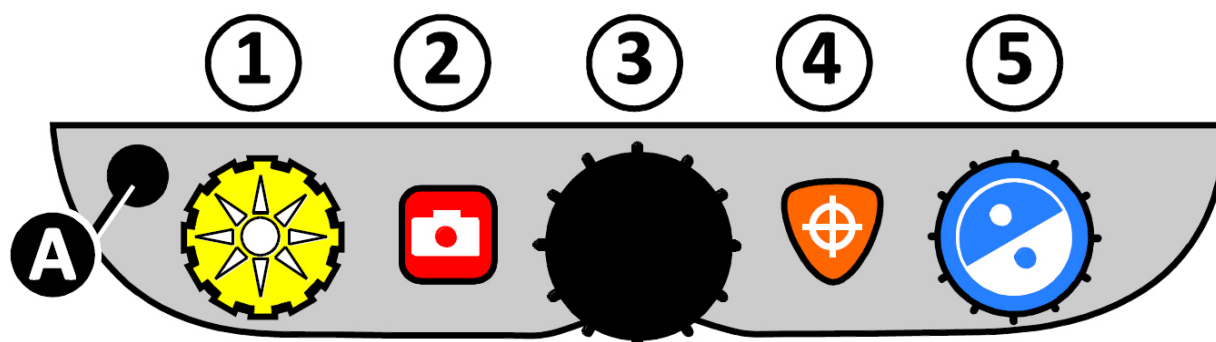

O botão AVANÇADO preto (A) é usado com outros botões do painel de controle para acessar e realizar mais recursos e operações.

Sempre pressione e segure o botão AVANÇADO (A) primeiro, e depois pressione ou gire os outros botões para realizar tarefas avançadas.

Por exemplo, para diminuir ou aumentar o brilho da luz do LED, primeiro pressione e segure o botão AVANÇADO (A), e depois gire o botão amarelo BRILHO (1).

(A+1)	Brilho (botão amarelo)	Gire para direita e esquerda para aumentar ou diminuir a luz do LED.
(A+2)	Congelar quadro (botão vermelho)	Pressione e segure para salvar a imagem atual a um cartão SD. Solte o botão quando o ícone Salvo aparecer na tela. Imagens podem somente ser salvas quando um cartão SD estiver inserido no leitor de cartão SD.
(A+3)	Ampliação (botão preto central)	Gire para selecionar um dos quadro modos de máscaras e linhas horizontais e verticais na tela.
(A+4)	Encontrar (botão laranja)	Pressione e seguro por aproximadamente 10 segundos para entrar no Modo de Configurações.
(A+5)	Modo de Cor (botão azul)	Gire para direita ou esquerda para aumentar ou diminuir o espaçamento entre as máscaras e linhas.