Usando a Focus 14, 40 e 80 Blue com iOS



PUBLICADO POR

Freedom Scientific

11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 - EUA www.freedomscientific.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 Vila Clementino São Paulo - SP CEP 04042-032 - Brasil Telefone/Fax: (11) 3266-4311 E-mail: <u>teca@tecassistiva.com.br</u> <u>www.tecassistiva.com.br</u>

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Tecassistiva.

Suporte técnico

Para entrar em contato com o **Suporte técnico** por telefone, os clientes podem ligar para **(11) 3266-4311**, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30.

Para entrar em contato por e-mail, envie perguntas para

suporte@tecassistiva.com.br.

Para pesquisar na base de conhecimento, visite **www.tecassistiva.com.br** e escolha o link **Suporte**.

Índice

Usando a Focus 14, 40 e 80 Blue com iOS		
Emparelhando a Linha Blue Focus	4	
Comandos Focus Blue para iOS	5	
Comandos De Navegação		5
Comandos De Leitura		6
Comandos Gerais		7
Comandos específicos da Focus Blue		8



Usando a Focus 14, 40 e 80 Blue com iOS

Emparelhando a Linha Blue Focus

Nota: A quinta geração do Focus blue requer iOS 11 ou posterior.

Para estabelecer uma conexão Bluetooth entre o Linha Focus Braille e um dispositivo Apple iOS, faça o seguinte:

- 1. Ligue a Focus.
- 2. No dispositivo iOS, abra Ajustes, Bluetooth e certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado.
- Toque duas vezes no botão Voltar para retornar às Configurações e, em seguida, role e toque duas vezes em Acessibilidade. Note que se você ainda estiver usando iOS 11 ou 12, as configurações de acessibilidade estão localizadas em geral.
- 4. Role para baixo e toque duas vezes em VoiceOver para abrir as configurações do VoiceOver.
- 5. Role para Braille e duplamente toque em Braille para abrir a configuração em Braille. O dispositivo iOS vai começar a procurar por uma linha braille.
- Passe o dedo em "Escolha uma linha Braille" e o dispositivo deve dizer "Pesquisando". O nome do Focus será mostrado aqui quando for encontrado.
- Assim que a linha for encontrada, toque duas vezes no nome para abrir a tela de emparelhamento. No dispositivo iOS, digite 0000, em seguida, toque duas vezes no botão Parear, localizado no canto superior direito, para estabelecer a conexão.

Uma vez que a Focus foi emparelhada, se você ligar na linha antes de tirar o dispositivo iOS do modo de espera, a linha se conectará automaticamente. Lembrese de bloquear o dispositivo antes de desligar a Focus para garantir que a detecção automática braille funciona corretamente da próxima vez que quiser usar braille.

Comandos Focus Blue para iOS

As seções a seguir listam os comandos do iOS que podem ser executados no teclado do estilo Perkins, bem como outros controles nas linhas Focus Blue.

Nota: Pressione K + ESPAÇO, PONTOS 1-3 e a BARRA DE ESPAÇOS para ativar a Ajuda do VoiceOver. Você pode então pressionar vários controles na Focus para aprender como eles funcionam com o VoiceOver sem realmente executar o comando. Quando terminar, pressione B + ESPAÇO, PONTOS 1-2 e a BARRA DE ESPAÇOS para sair da Ajuda do VoiceOver.

Comandos De Navegação

Comandos com Barra de espaço	Função
PONTO 1 + ESPAÇO	Mover para o item anterior
PONTO 4 + ESPAÇO	Mover para o próximo item
PONTO 2 + ESPAÇO	Deslocar braille restante
PONTO 5 + ESPAÇO ECA	Deslocar braille direito
PONTOS 1-2-3 + ESPAÇO	Mover para o primeiro item
PONTOS 4-5-6 + ESPAÇO	Mover para o último item
PONTOS 1-2-4 + ESPAÇO	Localiza e coloca o foco em um item na tela atual que corresponde ao texto especificado (depois de digitar o texto a ser pesquisado, pressione PONTOS 1-5 + ESPAÇO para realizar a pesquisa)
PONTOS 1-3-5 + ESPAÇO	Deslocar para a direita
PONTOS 2-4-6 + ESPAÇO	Deslocar para a esquerda

PONTOS 3-4-5-6 + ESPAÇO	Role para cima ou abra a central de notificações quando estiver focado na barra de status
PONTOS 1-4-5-6 + ESPAÇO	Role para baixo ou abra o centro de controle quando estiver focado na barra de status
PONTOS 2-3-4 + ESPAÇO	Vai para a barra de status
PONTOS 2-3 + ESPAÇO	Selecionar a configuração anterior do rotor
PONTOS 5-6 + ESPAÇO	Selecionar a configuração do rotor seguinte
PONTO 3 + ESPAÇO	Mover para o item anterior do rotor
PONTO 6 + ESPAÇO	Mover para o item seguinte do rotor
Pontos 1-2-5 + ESPAÇO duas vezes rápido	Lança o seletor de aplicações
PONTOS 1-2-3-4-5 + ESPAÇO	Liga e desliga a Navegação rápida

Comandos De Leitura

Comandos com Barra de Espaço	Função
Pontos 1-2-3-5 + Espaço	Ler tudo o que começa no item selecionado
PONTOS 2-4-5-6 + ESPAÇO	Leia tudo, começando do início
PONTOS 1-2-3-4 + ESPAÇO	Pausa ou continuar a fala

Comandos Gerais

Comandos com Barra de espaço	Função
PONTOS 1-2 + ESPAÇO	Ativa o botão de trás, se estiver presente.
Pontos 1-4-5 + ESPAÇO ou ponto 7 + ESPAÇO	Ativa a tecla Delete.
Pontos 1-5 +ESPAÇO ou ponto 8 + ESPAÇO	Ativa a tecla Retorno.
PONTOS 1-2-4-5 + ESPAÇO	Ciclos entre seis pontos, oito pontos, e saída em Braille contraído.
PONTOS 2-3-6 + ESPAÇO	Ciclos entre seis pontos, oito pontos e dados em Braille contraído.
PONTOS 1-2-5 + ESPAÇO TECAS Tecnologia	Ativa o botão Home (pressione duas vezes rapidamente para lançar o alternador de aplicativos).
PONTOS 1-3-4 + ESPAÇO	Ativar ou desativar a fala.
PONTOS 2-3-4-5 + ESPAÇO	Ativa a tecla Tab.
PONTOS 2-3-5-6 + ESPAÇO	Selecionar Texto.
PONTOS 2-3-5 + ESPAÇO	Desmarque o texto.
PONTOS 3-4-5 + ESPAÇO	Aumentar o Volume.
PONTOS 1-2-6 + ESPAÇO	Baixar o Volume.
PONTOS 2-3-4-5-6 + ESPAÇO	Estilo do texto de saída.

Comandos específicos da Focus Blue

Comando	Ação
BOTÃO DE MOVIMENTO DO CURSOR	Tocar duas vezes no item selecionado
BOTÃO DE ROTEAMENTO DO CURSOR acima de uma célula	Se as células de status estiverem ativadas, fornece uma mensagem que descreve como interpretar as informações apresentadas nas células de status (pressionar um botão do roteador de cursor não acima de uma célula de status dispensa a mensagem)
Balanceador de Navegação esquerdo para cima	Mover para o item anterior do rotor
BALANCEADORES DE NAVEGAÇÃO ESQUERDO PARA BAIXO	Mover para o item seguinte do rotor
Botão de Modo esquerdo	Ativar o item atual idade
Balanceador de Navegação direito para cima	Mover para o item anterior
BALANCEADORES DE NAVEGAÇÃO DIREITO PARA BAIXO	Mover para o próximo item
Botão de Modo direito	Ativar o item atual
BOTÃO DE DESLOCAMENTO ESQUERDO	Deslocar braille à esquerda

BOTÃO DE DESLOCAMENTO DIREITO	Deslocar braille à direita
BOTÃO SELETOR ESQUERDO	Ativa o botão de trás, se estiver presente
BOTÃO SELETOR DIREITO	Iniciar ou interromper a ação atual (por exemplo, atende e desliga uma chamada, inicia e interrompe a reprodução de música ou vídeo, inicia e para o cronômetro, inicia e interrompe a gravação de vídeo, tira uma foto, inicia e interrompe a gravação do Memo de voz, pausa e retoma a reprodução do correio de voz ou interrompe a gravação da saudação do correio de voz personalizado)
BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA CIMA	Rolar para Cima.
BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA BAIXO	Rolar para Baixo. gia & Acessibilidade
BARRA BALANCEADORA DIRETA PARA CIMA	Deslocar para a esquerda
BARRA BALANCEADORA DIRETA PARA BAIXO	Deslocar para a direita

Visite o <u>site da Apple</u> para mais informações sobre o uso de Braille com VoiceOver no iOS.