

# **Usando a Focus 14 e 40 Blue com BrailleBack no Android**



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

## **Freedom Scientific**

11800 31st Court North

St. Petersburg, Florida

33716-1805 - EUA

[www.freedomscientific.com](http://www.freedomscientific.com)

E POR

## **Tecassistiva**

Av. Dr. Altino Arantes, 345 Vila Clementino

São Paulo - SP

CEP 04042-032 - Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: [teca@tecassistiva.com.br](mailto:teca@tecassistiva.com.br)

[www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Tecassistiva.

### **Suporte técnico**

Para entrar em contato com o **Suporte técnico** por telefone, os clientes podem ligar para **(11) 3266-4311**, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30.

Para entrar em contato por e-mail, envie perguntas para **suporte@tecassistiva.com.br**.

Para pesquisar na base de conhecimento, visite **www.tecassistiva.com.br** e escolha o link **Suporte**.

# Índice

---

Usando a Focus 14 e 40 Blue com BrailleBack no Android	4
Emparelhando a Linha Blue Focus	4
Comandos Focus Blue para BrailleBack	5
Comandos De Navegação	5
Comandos Gerais	6



TECASSISTIVA  
Tecnologia & Acessibilidade

# Usando a Focus 14 e 40 Blue com BrailleBack no Android

---

## Emparelhando a Linha Blue Focus

BrailleBack é um serviço de acessibilidade que ajuda os usuários cegos a fazer uso de dispositivos braille. Ele trabalha em conjunto com o aplicativo de TalkBack para dar uma experiência em braille e fala combinados.

O BrailleBack não está ativo por padrão. Para ligá-lo e estabelecer uma conexão Bluetooth entre o Focus e um dispositivo Android, faça o seguinte:

1. Ligue a Focus.
2. Vá para a configuração e selecione Acessibilidade.
3. Selecione BrailleBack e ligue a chave.
4. Volte à configuração e selecione Bluetooth. Certifica-te que o Bluetooth Está ligado.
5. Selecione a Linha Focus. O BrailleBack suporta apenas a linhas Focus 14 Blue e Focus 40 Blue.
6. Quando for solicitado um código de emparelhamento, escreva 0000 no campo de edição e, em seguida, toque duas vezes no botão OK para estabelecer a conexão.

Assim que o Focus tiver sido emparelhado, se você ligar a linha antes de tirar o dispositivo Android do modo de espera, a linha se conectará automaticamente. Lembre-se de bloquear o dispositivo antes de desligar a Focus para garantir que a detecção automática braille funciona corretamente da próxima vez que quiser usar braille.

## Comandos Focus Blue para BrailleBack

As seções a seguir listam os comandos do BrailleBack que podem ser executados a partir do teclado do estilo Perkins, bem como outros controles nas linhas Focus Blue.

### Comandos De Navegação

Comando	Função
<b>BOTÃO DE DESLOCAMENTO DIREITO</b>	Deslocar para à direita
<b>BOTÃO DE DESLOCAMENTO ESQUERDO</b>	Deslocar para à esquerda
<b>BARRA BALANCEADORA DIRETA PARA BAIXO</b>	Navegar para o próximo item
<b>BARRA BALANCEADORA DIRETA PARA CIMA</b>	Navegar para o item anterior
<b>BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA BAIXO</b>	Navegar para a linha seguinte
<b>BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA CIMA</b>	Navegar para a linha anterior
<b>BOTÃO SELETOR DIREITO</b>	Deslocar para a frente
<b>BOTÃO SELETOR ESQUERDO</b>	Deslocar Para Trás
<b>BOTÃO DE MOVIMENTO DO CURSOR</b>	Ativar o item atual
<b>BOTÃO DE MOVIMENTO DO CURSOR</b> pressione e segure	Toque e segure o item atual

## Comandos Gerais

<b>Comandos com Barra de espaço</b>	<b>Função</b>
<b>PONTOS 1-2 + ESPAÇO</b>	Ativa o botão de trás, se estiver presente
<b>PONTO 8 + ESPAÇO</b>	Ativa a tecla Retorno
<b>PONTOS 1-2-5 + ESPAÇO</b>	Ativa o botão Home
<b>Pontos 1-2-3-5 + ESPAÇO</b>	Abrir a janela de aplicações recentes
<b>PONTOS 1-3-4-5 + ESPAÇO</b>	Abre a janela de notificação
<b>PONTOS 1-2-3 + ESPAÇO</b>	Abrir a ajuda do teclado BrailleBack

Visite o [site do Google](#) para mais informações sobre o BrailleBack.



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade